

# Pharmacoll

## Skavsårsplåster




**Pharmacoll** är ett skavsårsplåster, utvecklad enligt modern och effektiv sårhäkning. Självhäftade och elastisk. Ett hydrokolloidförband vid blåsor och skavsår. De är individuellt förpackade och sterila.

**Pharmacoll** verkar smärtlindrande då hydrokolloidlagrets partiklar bildar en gelkudde vid absorbering av fukt och sårets utsöndring vilket ger en fuktig sårmiljö som främjar nybildning av hudceller. Skyddar nervändarna mot tryck och stötar.

**Pharmacoll** fastnar inte i såret och förbandet kan enkelt och smärtfritt tas bort och utan att påverka läkningen och vävnaden.

### Fördelar:

- Tillåter fri passage av gaser. Vatten o. bakteriesäker polyuretan yta skyddar såret från fukt o. bakterier.
- **Pharmacoll's** höga absorberingsförmåga binder fukt och utsöndring under förbandets olika skeden.
- **Pharmacoll** påskyndar läkeprocessen genom en idealisk sårhäkningsmiljö för bildandet av ny vävnad.
- **Pharmacoll** minimerar skorp- och ärrbildning.

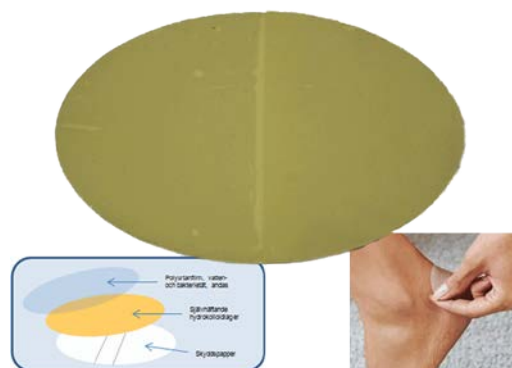

### Bruksanvisning:

- Rengör såret ordentligt. För att **Pharmacoll** ska fästa ordentligt ska skadeområdet vara torrt och fritt från hudkrämer. Ta bort skyddspapperet och tryck fast, lägg handen över och värm i ca 1 minut för att plåstrets kanter ska fästa ordentligt.
- **Pharmacoll** ska sitta på tills det lossnar av sig självt efter ett par dagar.

*Pharmacoll skall inte användas vid tredje gradens brännsår, exponerad muskel, ben och sena eller vid infekterade sår.*



STERILE EO

Art nr.	3382
Storlek:	68x43mm