

# Transparent vattentätt plåster



Pharmapore - PU

<b>Storlek:</b> 8.25 x 6cm	<b>Frp:</b> 200st / kart
-------------------------------	-----------------------------

## Beskrivning

Transparent skyddande plåster för lätta- till måttliga sekretskador.

Tillverkad av en polyuretan-, bakterie- och vattensäker film belagd med ett hypoallergenisk häftämne steriliserad med Etylenoxid gas, levereras med icke-häftande, centralt placerad sårdyna.

## Fördelar

- Bibehåller det orörda skicket i såret.
- Mycket enkel att applicera.
- Ger en fuktigt miljö som förstärker läkeprocessen och minskar smärtan.
- Gör det möjligt att duscha och vistas i blöt miljö utan risk.
- pharmapore Pu tillåter såret att andas och genomsläpp av vattenånga, skyddar huden mot skador i vävnaden, kan behållas på i upp till 5 dagar för att minimera risk för kontamination.
- pharmapore PU är ett post operativ plåster för att skydda rena sår.

## Applicering



Rengör såret och ta ur plåstret ur förpackningen enligt numreringen på förpackningen 1, 2 och 3.



Tag bort skyddspappret **1** på undersidan vid sårdynan.



Placera den icke-häftande sårdynan över såret.

**Sträck inte plåstret under appliceringen.**

Tag bort skyddspappret **2** på undersidan vid sårdynan.



Tag försiktigt bort skyddspappret **3** på ovansidan och släta till plåsterkanterna. Släta sedan till hela plåstret från mitten utåt kanterna med ett lätt tryck för att öka vidhäftningen.



Med plåstret på plats skyddar det såret mot kontaminering samtidigt möjliggörs användning i blöt miljö.



STERLIE EO



CE  
0120

AlphraMedic