

Ögondusch spray

EyeWash - trippel

Buffrad Natriumklorid lösning 9%



Medi-spray ögondusch för behandling av ögonskada, brännskada och sårtvätt.

Sprayen innehåller 250ml buffrad Natriumklorid lösning 9mg / liter.

Spoltid – 15 minuter / spray



Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

*Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.*

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

AlphaMedic's **EyeWash-trippel** är en väska som innehåller 3st ögondusch sprayer som ger 45 minuters spoltid. Det är enkelt att snabbt ta ned väskan från väggfästet och ta med under transport.

På arbetsplatsen ska väskan sitta inom ”**räckhåll**” där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.



Art nr: 8700
Art nr 8740

Komplett ögonduschstation
Ögondusch 250ml - refill

AlphaMedic

STERILE R

CE 0413