

## ANVÄNDNING

- ❖ Öppna påsen vid jacket
- ❖ Tag upp förbandet
- ❖ Täck skadan, ca. 1-2 cm utanför det skadade området
- ❖ Förbandet skall ha hudkontakt
- ❖ Färdig Ansiktsmask finns
- ❖ Håll förbandet rent
- ❖ Häll över gelen från påsarna
- ❖ Fixera förbandet med elastisk binda
- ❖ Skall ligga på upp till 2 timmar
- ❖ Gelen sköljs bort med sterilt vatten



## HYPOTERMI

- ❖ **Tänk på att BURNCARE kyler mycket effektivt**
- ❖ **Kyl skadan, inte patienten**
- ❖ **Vid omfattande skador, kontrollera patientens temperatur regelbundet**
- ❖ **Vid transporter, där det är svårt att hålla rätt temperatur (i t.ex. ambulansen), kan patienten täckas med filter**